




ПРИНЦИП РАБОТЫ ЭКСПРЕСС-ТЕСТА

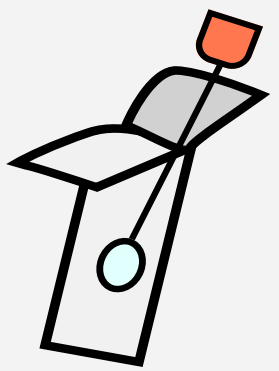


1. Вскрыть упаковку зонда-тампона

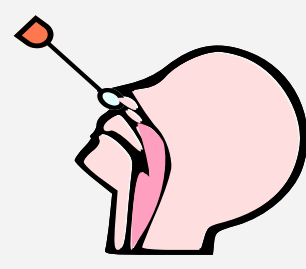


2. Забрать пробу из носоглотки

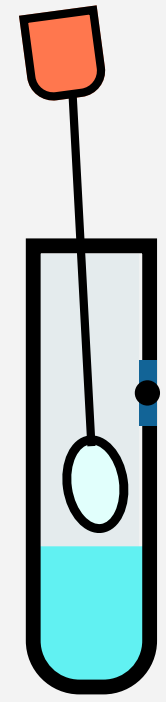


3. Добавить пробу во флакон с буфером, сделать 6 вращательных движений, выдержать не менее 10 секунд

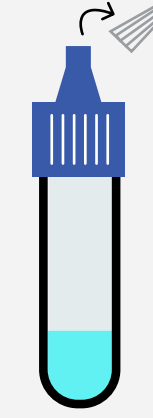

4. Извлечь зонд, закрыть флакон и снять наконечник

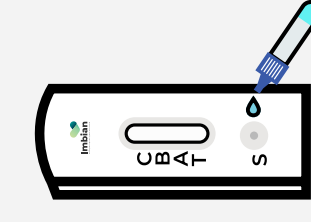


5. Внести 2-3 капли образца в отверстие S тест-кассеты

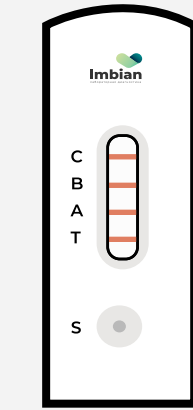


6. Оценить результат через 7 минут, но не позднее 20 мин.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ


1. Положительный

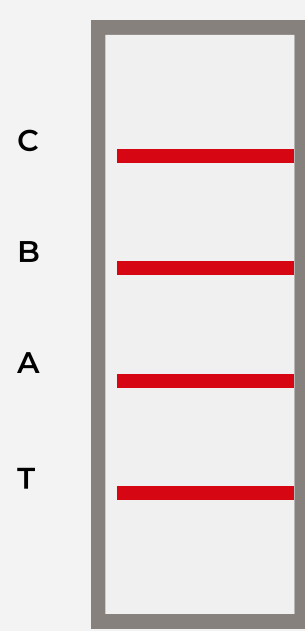


Выявлен антиген вируса гриппа типа А, типа В и Covid-19

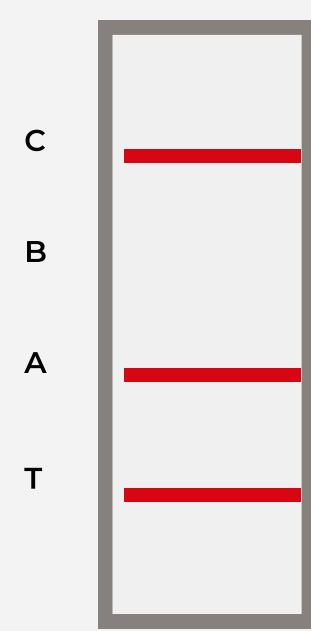


Выявлен антиген гриппа типа А и Covid-19

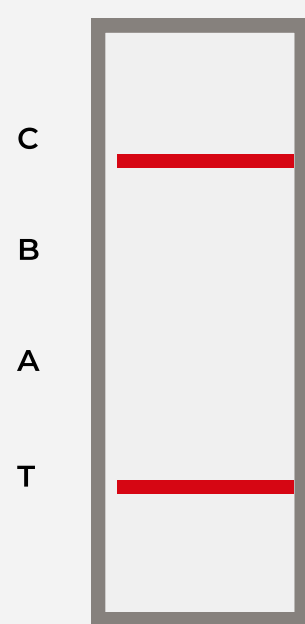


Выявлен антиген вируса Covid-19

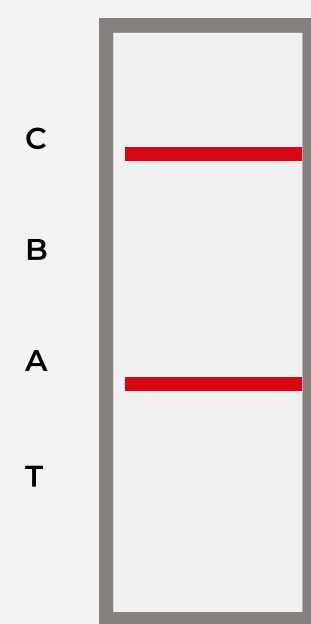


Выявлен антиген гриппа типа А

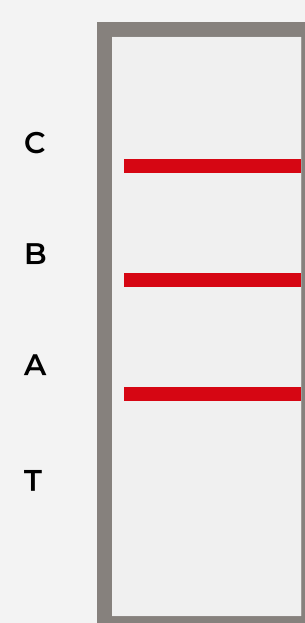

Выявлен антиген гриппа типа А и типа В

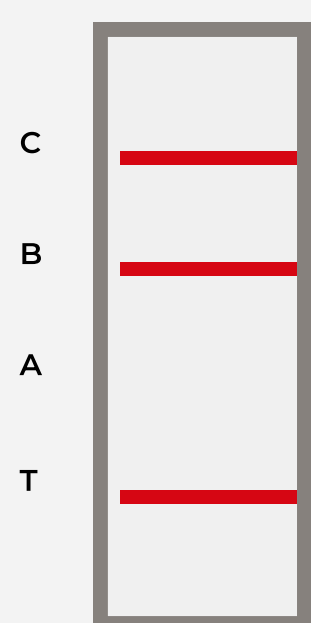


Выявлен антиген гриппа типа В и Covid-19

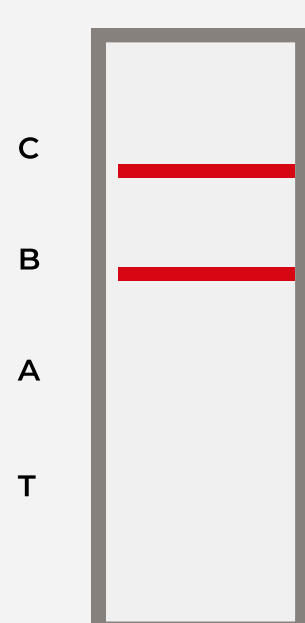

Выявлен антиген вируса гриппа типа В

2. Отрицательный

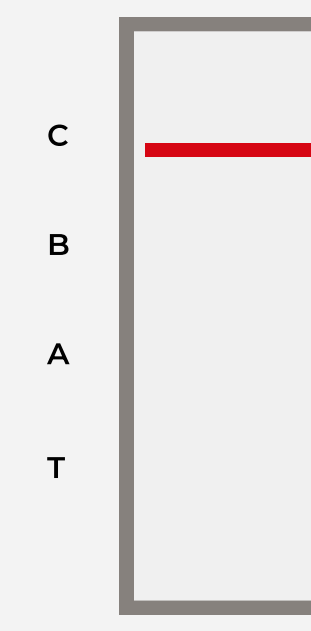

Не выявлен антиген вирусов гриппа типов А/В или Covid-19

3. Тест не сработал

*следует сделать повторный тест

